

機械器具 52 医療用拡張器
 一般医療機器 医療用拡張器 JMDN コード: 70969001
 販売名 JPS ダイレーター

【警告】

- ・本品は未滅菌品であるため、必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。

【禁忌・禁止】


- ・本品を曲げ、切除、打刻(刻印)等の二次加工(改造)は、折損等の原因となるので絶対行わないこと。
- ・本品を使用目的以外で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

＜素材＞

ステンレス鋼

＜形状・構造＞

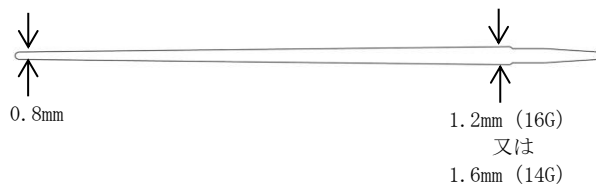

＜原理＞

本品は、瘻孔を拡張するために用いる器具であり、他の組織を損傷することがないように先端が鈍になっているテーパ状の器具である。太さは、16G (1.2mm) と 14G (1.6mm) に拡張できる2種類のものがある。

【使用目的又は効果】

瘻孔を拡張するために用いる。

【使用方法等】

本品は未滅菌であり、使用の際は必ず洗浄を行い、下記の条件又は医療機関により確認され検証された滅菌条件において滅菌を行うこと。

＜標準的な滅菌条件：高圧蒸気滅菌法＞

温度	時間
121℃	20分以上
126℃	15分以上

使用後は流水で洗浄して血液や体液等を取り除き、乾燥させた後、直射日光を避けて室温で保管すること。

【使用上の注意】

1. 本品は未滅菌であるため、使用前には必ず適切な方法で、洗浄・滅菌を行うこと。
2. 使用前に、破損・変形・亀裂・傷・摩耗等がないか点検すること。異常が確認された際は、使用しないこと。
3. 使用目的以外の用途では使用しないこと。
4. 破損、折損等の原因になるため、使用時には必要以上の力を加えないこと。
5. 使用後は速やかに洗浄を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 使用後は流水で洗浄して血液や体液等を取り除き、乾燥させた後、直射日光を避けて室温で保管すること。
2. 本品に、破損・変形・亀裂・傷・摩耗等の異常が認められた場合は、新しい商品と交換すること。

【取扱上の注意】

1. 器具の寿命を著しく低下させるので粗雑な取り扱いはしないでください。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常及び使用前に点検を行い、異常がないことを確認すること。
2. 磨き粉や金属タワシで本品を磨かないこと。
3. 使用後は速やかに洗浄すること。
4. 洗浄後は十分に乾燥させること。
5. 滅菌方法については、本添付文書【使用方法等】を参照すること。

【包装】

1本入り、2本入り、又は4本入りのものがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: JPS 株式会社

電話番号: 03-5992-0760

製造業者: STUDEX CORPORATION (米国)